



Kombajn kosmetyczny 10w1 BN-801B

Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	bn-801B

Opis produktu

Funkcje:

- **Vacum**
- **High-frequency - elektroterapia**
- **Brush**
- **Spray**
- **Galwan**
- **Wapozon z ozonem - nawilżacz**
- **Lampa z lupą**
- **Lampa Wooda**
- **Ultradźwięki - ultrasonoforeza**
- **Skin Scrubber (peeling kawitacyjny)**

1. Vacuum:

Podciśnienie (ssanie) jest wykorzystane do masażu próżniowego zapewniającego lepsze ukrwienie powierzchni skóry i ogólną poprawę krążenia w obszarze przeprowadzonego zabiegu, a także służy do zamykania porów oraz usuwania zanieczyszczeń skóry pochodzenia komórkowego. Pomocne w głębokim oczyszczaniu skóry.

2. High-Frequency - elektroterapia:

Umożliwia wykonywanie elektromasaży z wykorzystaniem tzw. prądów d'Arsonvala. Występujące przy kontakcie szklanej elektrody ze skórą iskrzenie ma wpływ pobudzający na skórę i tkanki podskórne, mięśnie oraz pośrednio na narządy wewnętrzne, a wytwarzany przy zabiegu ozon ma działanie bakteriobójcze. Działanie ładunków elektrycznych powoduje rozszerzenie naczyń krwionośnych skóry, przyspiesza przemianę materii, co jest ważnym czynnikiem zwiększenia absorpcji substancji odżywczych i leczniczych zawartych w preparatach kosmetycznych.

3. Brush:

Umożliwia perfekcyjny masaż skóry oraz wspomaga peeling w dowolnym miejscu ciała. Przez możliwość stosowania wymiennych, różnorodnych nasadek daje nieocenione wsparcie w zabiegach kosmetycznych, zwiększając intensywność oddziaływania substancji czynnych zawartych w kosmetykach jak i przyspieszając ich działanie. Wzrasta przez to skuteczność zabiegu i skraca się wydatnie jego wykonanie.

4. Spray:

Nadciśnienie które może być użyte do rozpylania płynów takich jak toniki, wody lub olejki zapachowe czy inne preparaty kosmetyczne (np. preparaty do opalania natryskowego) oraz do nawilżania metodą zimnego natrysku.

5. Galwan:

Służy do galwanizacji i jonoforezy oraz innych zabiegów kosmetycznych wykorzystujących oddziaływanie prądu galwanicznego na tkanki. Może być stosowany przy nerwobólach, przewlekłych zapaleniach nerwów, zaburzeniach naczyniowych, odmrożeniach, trądziku różowatym i pospolitym, zwiótczeniach skóry i mięśni, bliznach, uczuleniach i innych schorzeniach, przy usuwaniu których korzysta się z pozytywnego oddziaływania prądu galwanicznego na organizm ludzki.

6. Wapozon z ozonem - nawilżacz:

Nawilża skórę za pomocą pary, zmiękcza skórę, otwiera pory, rozluźnia mięśnie twarzy co ułatwia zabieg oczyszczania oraz przygotowuje skórę do dalszych zabiegów. Umożliwia stosowania aromaterapii oraz ziołoterapii.

7. Lampa z lupą:

Łatwa do przesuwania i ustawienia lampa powiększająca, posiada wysokiej jakości refrakcyjne szkło powiększające oraz wbudowany system oświetlający, które pozwalają na optymalne diagnozowanie skóry. Głowica lampy umieszczona jest na

wysięgniku, ułatwiającym jej ustawienie na określoną odległość i wysokość. Ułatwia pracę podczas zabiegów kosmetycznych.

8. Lampa Wooda:

Specjalna lampa emitująca długofalowe promieniowanie ultrafioletowe, dająca możliwość dokładnego obejrzenia skóry. W zależności od rodzaju cery oraz schorzeń na skórze oświetlonej lampą Wooda wystąpią różnobarwne odbicia.

9. Ultradźwięki - ultrasonoforeza:

Wykorzystuje zjawisko fali akustycznej. Powoduje poprawę ukrwienia skóry, stosowany przy terapiach antycellulitowych, leczeniu rozstępów, nerwobóli, odmrożeń. Umożliwia włączanie w głębsze warstwy skóry preparatów odżywczych, nawilżających, regenerujących i dotleniających.

10. Skin scrubber - peeling kawitacyjny (Ultrasonic peeling) jest to nowy system do głębokiej pielęgnacji skóry i jej regeneracji bez efektów ubocznych. Zabieg ten polega na oczyszczeniu skóry poprzez fale ultradźwiękowe, pozwala więc na dokładne usunięcie nadmiaru sebum z porów i mieszków włosowych, pozbycie się zrogowaciałego naskórka, zaskórników, wągrów i bakterii. Peeling kawitacyjny jako system działa na skórę łagodnie poprzez przyjemne, naturalne wibracje bez użycia prądu elektrycznego. Zastosowanie tego urządzenia pozwala na głęboką regenerację skóry poprzez błyskawiczne i efektywne jej odnowienie oraz oczyszczenie na dużej głębokości, czego rezultatem jest - zauważalna w widoczny sposób - skóra odnowiona i odświeżona. Jest to zabieg bezbolesny odczuwany zwykle jako przyjemny. Kawitacja pozytywnie działa również na głębsze warstwy naskórka, stanowi doskonały wstęp do dalszych zabiegów kosmetycznych (eksfoliacja kwasami i/lub sonoforeza i jonoforeza i inne).

Dane techniczne:

Model: BN-801B,

Zasilanie: 220V,

Waga: 30kg,

Wymiary urządzenia: 155x40x45cm,

Wymiary opakowania: 97x64x48cm,

Okres gwarancji: 12 miesięcy